

1 À PROPOS DE CE GUIDE RAPIDE



Ce guide rapide n'a pas pour vocation de remplacer le manuel d'utilisation. Il est obligatoire de lire la totalité du manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil ! Certaines des fonctions suivantes peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques choisis.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

Le MA 1 est un instrument portable de dépistage de l'audition servant à indiquer le niveau d'audition des individus.

3 PRISE EN MAIN DU MA 1



| N° | Symbole | Explication |
|----|-------------------------|--|
| 1 | Bouton central | Bouton d'alimentation et sélecteur d'oreille D/G |
| 2 | LED (cercle rouge/bleu) | Indication du signal présenté dans l'oreille droite (R) /gauche (L) |
| 3 | LEDs | Indicateur de niveau (en dB) |
| 4 | Flèche vers le haut | Augmente le niveau de 5 dB |
| 5 | Flèche vers le bas | Diminue le niveau de 5 dB |
| 6 | Fréquences | Quatre boutons spécifiques pour la présentation du stimulus (0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz et 4 kHz) |
| 7 | s.o. | Connexion pour casque. |
| 8 | s.o. | Compartiment à batteries |

Alimentation de l'appareil



Lorsque les piles sont trop faibles pour produire le signal approprié (puissance restante de 2,1 V ou moins), l'appareil s'éteint et ne se rallume pas tant que les piles n'ont pas été remplacées. Pour insérer les piles, procédez comme suit:

1. Tirez sur la languette du compartiment des piles et retirez le panneau.
2. Insérez 2 piles AA orientées comme indiqué dans le compartiment.
3. Repositionnez le panneau et remettez la languette en place.

4 PROCÉDURE DE TEST

1. Positionnez les casques sur le patient en plaçant l'écouteur ROUGE sur l'oreille DROITE et l'écouteur BLEU sur l'oreille GAUCHE. Assurez-vous que le bandeau repose bien sur le sommet de la tête et que les écouteurs sont centrés sur les deux oreilles.
2. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton central supérieur (1). Le niveau est pré-réglé à 50 dB.
3. Sélectionnez le niveau approprié à l'aide des touches fléchées haut/bas (4/5) et appuyez sur l'un des quatre boutons de fréquence (6) pour présenter le stimulus (0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz ou 4 kHz). Le stimulus est présenté tant que le bouton est enfoncé.
4. Pour changer d'oreille, appuyez sur le bouton central supérieur (1). Le niveau est à nouveau pré-réglé à 50 dB
5. L'appareil se met automatiquement hors tension après environ 90 secondes.

Pour plus d'informations, demandez à votre distributeur local ou à MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin, Allemagne. Tél. : +49 30 70 71 46-50 - Fax : +49 30 70 71 46-99 - E-mail : sales@maico.biz - Internet : www.maico.biz